



# Gerade Treppenlifte

Handicare 1000 | Serie Simplicity



## Die Vorteile eines Handicare Treppenlifts

Wenn Sie über die Anschaffung eines geraden Treppenlifts nachdenken, bietet Ihnen Handicare eine sichere und zuverlässige Lösung. Als einer der weltweit führenden Hersteller für Treppenlifte, hat Handicare bereits zehntausenden Menschen geholfen, die Probleme beim Treppensteigen zu beseitigen.

Man unterscheidet bei Treppenliften grundsätzlich zwei Ausführungen des Schienenverlaufs: Den geraden und den kurvigen. Treppenlifte mit gerader Schiene werden ausschließlich auf geraden Treppenverläufen montiert, nicht auf Verläufen mit kurvigen oder eckigen Bereichen. Handicare bietet mehrere gerade Treppenliftserien an, die Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden.

Es wird oft angenommen, dass Treppenlifte ausschließlich an der Wand montiert werden. Die geraden Treppenlifte von Handicare werden auf den Treppenstufen installiert. Alle Handicare Treppenlifte fahren mit Akkubetrieb. Die Akkus werden bei Nichtgebrauch der Lifte auf den Parkstellen mit Netzstrom geladen. Das heißt, der Liftbetrieb ist auch bei Stromausfall möglich. Sie brauchen keine Angst haben „stehenzubleiben“.





## Sicherheit als Standard

Alle Handicare Treppenlifte haben Sicherheitssensoren an der Fahreinheit und am Fußbrett. Diese dienen dazu, den Lift zu stoppen, wenn er auf ein Hindernis trifft. Wenn der Lift stoppt, kann er in die dem Hindernis entgegengesetzte Richtung gefahren werden, um z.B. das Hindernis auf den Stufen entfernen zu können. Die geraden Treppenlifte haben ein Diagnosedisplay, damit Sie den Status Ihres Treppenlifts überwachen können.



Zur Standardausrüstung Ihres Treppenlifts gehört zudem ein Sitzgurt, damit Sie sicher fahren können. Unser einfach zu lösender, selbstaufrollender Sitzgurt, lässt sich seitlich oder mittig schließen. Er passt sich dem Wunsch des Nutzers flexibel an, auch bei mehreren unterschiedlichen Nutzern ist dies ein großer Vorteil.

## Einfache Verwendung

Alle Handicare Treppenlifte werden durch den in Fahrtrichtung gedrückt zu haltenden, großen, robusten Bedienhebel betrieben. Der Bedienhebel befindet sich an der Front der Armlehne und kann problemlos mit der Hand oder dem Arm bedient werden. Seine Position an der Armlehne ermöglicht Ihnen eine uneingeschränkte Auf- oder Abstütznutzung beim Hinsetzen oder Aufstehen aus dem Sitz.

Alle Handicare Treppenlifte werden außerdem mit zwei Fernbedienungen geliefert, die dazu verwendet werden können, den Treppenlift von einer anderen Etage zu sich heranzuholen oder in eine andere Etage von sich wegzuschicken. Dies ist besonders nützlich in Situationen mit mehreren Nutzern.





## Handicare Simplicity

Wenn Sie keine elektrischen Zusatzoptionen benötigen, bietet Ihnen das Modell Simplicity eine sichere und kostengünstige Lösung für das Problem des Treppensteigens. Fußbrett und Sitzdrehung beim Modell Simplicity werden manuell betätigt. Zur Standardausrüstung des Simplicity gehört ein Sitzgurt mit Clipverschluss.

## Handicare Simplicity<sup>L</sup>

Der Simplicity<sup>L</sup> bietet Ihnen alle Standard-Funktionen des Simplicity Modells und dazu den Vorteil eines elektrisch betätigten Fußbretts als Standard. Das heißt, Sie müssen sich zum Hoch- und Herunterklappen des Fußbretts nicht herunterbeugen.

## Handicare Simplicity<sup>+</sup>

Für Nutzer, die elektrisch betätigte Optionen benötigen, bietet das Modell Simplicity<sup>+</sup> eine stilvolle Lösung. Hierbei wird der fortlaufende Ladestreifen an der Schiene des Modells Simplicity mit dem Smart Sitz des Modells Handicare 1000 kombiniert. Der Smart Sitz bietet Ihnen eine Auswahl von sechs Farben. Beim Simplicity<sup>+</sup> sind Fußbrett und Drehsitz optional elektrisch zu betätigen.

### Die Serie Simplicity

Jeder Treppenlift der Serie Simplicity kann überall an der Schiene aufgeladen werden. Das bedeutet, er kann an beliebiger Stelle geparkt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist, da die Akkus in jeder Position aufgeladen werden. Wenn zwischen Türen und der untersten oder obersten Stufe Ihrer Treppe nur wenig Platz ist, bietet Ihnen die Serie Simplicity verschiedene Lösungen, um Türen weiterhin ungehindert nutzen zu können. Ihr Treppenlift kann, je nach Bedarf, mit einer manuell betätigten Klappschiene oder mit einer elektrischen Gleitschiene geliefert werden, um Türbereiche freizuhalten.

### Polster Simplicity & Simplicity<sup>L</sup>



SAND

### Farbauswahl für Polster Simplicity<sup>+</sup> & 1000



KAKAO




RUBIN-ROT




SAND



SAPHIR-BLAU

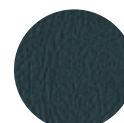

SCHIEFER

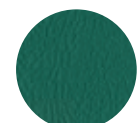

JADE-GRÜN

Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben leicht von den angezeigten Farben abweichen können.



## Handicare 1000

Für Nutzer, die minimalste Beeinträchtigung der Treppenbreite wünschen, bietet das Modell Handicare 1000 eine der schmalsten geraden Schienen auf dem Markt. Der Smart Sitz ist in sechs verschiedenen Polsterfarben erhältlich und kann optional mit elektrischer Drehfunktion geliefert werden. Auch ein elektrisch hochklappbares Fußbrett kann geliefert werden.

Die schmale Aluminiumschiene mit verdeckter Zahnstange bietet oben und unten Parkmöglichkeiten (als Standard), an denen die Akkus bei Nichtgebrauch des Liftes aufgeladen werden. Auch hier also volle Fahrfunktion auch bei Stromausfall.

Der Handicare 1000 kann optional mit einer elektrisch betätigten Klappschiene geliefert werden, um nahe an der untersten Stufe befindliche Türbereiche freizuhalten.

## Außentreppenlift

Oftmals stellt nicht nur die Treppe im Haus ein Problem dar, sondern auch Treppen vor der Haustür sowie im Terrassen – und Gartenbereich.

Der Handicare 1000 Außenlift ist vollkommen wassergeschützt und dient Ihnen bei der Bewältigung von geraden Treppen im Aussenbereich.

Wie alle Handicare Treppenlifte hat das Modell für draußen einen Schlüsselschalter, um unbefugte Benutzung zu verhindern.

Der Handicare Außenlift wird mit UV-fester schiefergrauer Polsterung und mit wasserdicht geschützten Komponenten geliefert, damit er dauerhaft vor Witterung geschützt, zuverlässig einsatzbereit ist.



## Handicare 1000 XL/XXL

Der Handicare 1000 XL hat mit 160kg und als XXL mit 200kg die höchste Traglast unserer Lifte.





## Benutzerkomfort



### Elektrisch betätigte Drehvorrichtung

Um oben an der Treppe sicher auf der Etageebene absteigen zu können, ist der Sitz generell von der Treppe weg in Richtung Etageebene zu drehen. Dies kann manuell oder elektrisch erfolgen. Wenn Sie die Option einer elektrisch betätigten Drehvorrichtung gewählt haben, wird diese durch Gedrückt halten des Bedienhebels aktiviert. Oben angekommen, wendet sich der Sitz zum sicheren Aussteigen automatisch in Richtung Etageebene.



### Elektrisch betätigtes Fußbrett

Fußbrett und Sitzfläche können in Parkposition hochgeklappt werden, um für andere Treppennutzer möglichst viel Raum auf der Treppe zu erhalten. Wenn Sie die Option des elektrisch betätigten Fußbretts wählen, brauchen sie sich zum Hoch- und Herunterklappen des Fußbretts nicht herunterzubeugen.



### Stehsitz

Manche Nutzer sind in der Bewegung ihrer Knie- oder Hüftgelenke eingeschränkt. In diesen Fällen kann unser Stehsitz eine Lösung bieten. Stehsitze sind für die Modelle Simplicity+ und 1000 erhältlich.

## Benötigen Sie eine Klappschiene?

Zum sicheren Auf- und Absteigen fährt der Lift immer so weit wie nötig auf die Etageebene. Daher führt der Schienenverlauf über die unterste Stufe hinaus in die Etageebene hinein. Ist die Distanz zwischen der untersten Stufe und einem Türbereich sehr klein, kann die Türbenutzung durch den Schienenüberstand eingeschränkt sein. In diesen Fällen sollte die Option einer Schiene mit Klappschiene gewählt werden. Somit kann die Schiene unten nach der Nutzung vom Türbereich weggeklappt werden, wodurch die Nutzung des Türbereichs wieder uneingeschränkt wird.



Alle geraden Treppenlifte von Handicare sind mit einer manuell betätigten Klappschiene erhältlich. Der Handicare 1000 auch mit automatischer Klappschiene. Bei Betrieb des Bedienhebels hebt/senkt sich die Klappschiene automatisch.

### Die Gleitschiene

Der Handicare Simplicity Treppenlift mit optional bestellbarer Gleitschiene bietet Ihnen eine einzigartige Lösung, die Ihnen die Notwendigkeit einer Klappschiene im unteren Treppenbereich erspart. Auch im oberen Treppenbereich kann Ihnen die Gleitschiene helfen, Türbereiche freizuhalten.



# Gerade Treppenlifte von Handicare im Überblick

Sitz-Optionen	Simplicity <sup>(L)</sup>	Simplicity <sup>+</sup>	1000	1000 XL	1000 XXL	
Polsterauswahl	-	✓	✓	✓	✓	Eine Auswahl von sechs Polsterfarben ermöglicht eine Abstimmung auf Ihre Einrichtung.
Manuelle Drehfunktion	✓	✓	✓	✓	-	Damit Sie problemlos aus dem Treppenlift aufstehen oder im Treppenlift Platz nehmen können.
Automatische Drehfunktion	-	○	○	○	✓	Dreht den Sitz, um das Aufstehen so weit wie möglich zu erleichtern.
Armlehnen-Distanzstücke	-	○	○	○	-	Erweitert den Abstand der Armlehnen des Smart-Sitzes von 550 mm auf 590 mm.
Erweiterte Armlehnen-Distanzstücke	-	○	○	○	✓	Erweitert den Abstand der Armlehnen des Smart-Sitzes von 550 mm auf 637 mm.
Erweiterte Sitztiefe	-	○	○	○	✓	Erweitert die Sitztiefe des Smart-Sitzes von 360 mm auf 425 mm.
Stehsitz	-	○	○	○	-	Ideal für Benutzer, die Probleme haben, die Hüften oder die Kniegelenke zu beugen.
Version für den Außenbereich	-	-	○	○	-	Für den Einsatz im Freien konzipiert, beispielsweise für die Treppe zur Haustür.
Sitzgurt mit Clip	✓	-	-	-	-	Dieser schwarze Sitzgurt ist mit einem zentralen Clip ausgestattet, der zum Öffnen von beiden Seiten gedrückt werden muss.
Sitzgurt mit Klettverschluss	-	○	○	○	-	Dieser schwarze Sitzgurt ist an beiden Enden mit Klettverschluss zu befestigen.
XXL-Sitzgurt mit Klettverschluss	-	○	○	○	✓	Dieser extra extra lange schwarze Sitzgurt ist an beiden Enden mit Klettverschluss zu befestigen.
Aufrollbarer Sitzgurt	-	✓	✓	✓	-	Dieser aufrollbare cremefarbene Sitzgurt kann an einer Seite oder ungefähr in der Mitte befestigt werden
Fußstützen-Optionen	Simplicity <sup>(L)</sup>	Simplicity <sup>+</sup>	1000	1000 XL	1000 XXL	
Manuell	✓	✓	✓	✓	✓	Die Fußstütze wird von Hand hoch- und nach unten geklappt.
Vom Sitz aus aktiviert	✓*	○	○	○	○	Klappt die Fußstütze hoch, sobald der Sitz hochgeklappt wird.
Von der Armlehne aus aktiviert	-	○	○	○	○	Die Fußstütze kann durch Betätigung eines Schalters unter der Armlehne hoch- oder heruntergeklappt werden, während der Benutzer im Lift sitzt.
Schienenfunktionen	Simplicity <sup>(L)</sup>	Simplicity <sup>+</sup>	1000	1000 XL	1000 XXL	
Lademöglichkeit auf der gesamten Schiene	✓	✓	-	-	-	Ihr Lift wird auf jeder Stelle der Schiene aufgeladen, sobald er abgestellt wird.
Mehrere Ladepunkte	-	-	✓	✓	✓	Verwenden Sie Ihre Fernbedienung, um den Lift auf einem der Ladepunkte abzustellen.
Eloxierte Slimline-Schiene	-	-	✓	✓	✓	Die Slimline-Schiene maximiert die lichte Weite Ihrer Treppe bei installiertem Treppenlift.
Keine Behinderung auf der Etage	○	-	-	-	-	Wenn eine Tür am oberen Treppenabsatz durch die Schiene blockiert wäre.
Manuell betätigter Klappmechanismus	○	○	○	-	-	Wenn eine Tür am unteren Treppenabsatz durch die Schiene blockiert wäre.
Automatische Klappschiene	-	-	○	-	-	Bewegt die Schiene automatisch mit dem fahrenden Treppenlift mit, und verhindert das Blockieren von Türen.
Gleitschiene	○	○	-	-	-	Die Schiene bewegt sich mit dem fahrenden Treppenlift mit und verhindert auf diese Weise, dass Türen blockiert werden. Außerdem wird dadurch eine Klappschiene überflüssig.
Tragekraft	Simplicity <sup>(L)</sup>	Simplicity <sup>+</sup>	1000	1000 XL	1000 XXL	
Standard-Höchstgewicht	140kg**	140kg**	137kg	160kg	200kg	
Erfüllung der Standards	Simplicity <sup>(L)</sup>	Simplicity <sup>+</sup>	1000	1000 XL	1000 XXL	
EN 81-40	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Standardmäßig verfügbar ○ Optional - Nicht verfügbar

\* Nur verfügbar auf der Simplicity<sup>-</sup> \*\*120 kg mit Klappschiene/Gleitschiene

# Den Alltag erleichtern

## Erfahrung

Handicare verfügt über mehr als 125 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von Treppenliften. Somit sind wir einer der ältesten Hersteller von Treppenliften in Europa.

Mit technischer Perfektion und intelligenten Lösungen bietet Handicare nicht nur Treppenlifte mit hohem Komfort, sondern auch individuelle Lifte im Stil und Geschmack des Kunden. Spitzenqualität in jeder Hinsicht macht den Treppenlift von Handicare zu einem wertvollen Element der Unabhängigkeit in Ihrem Zuhause. Viele zufriedene Nutzer erfahren dies täglich.

## Qualität

Handicare gewährleistet sowohl hohe Qualität, als auch, Sicherheit, Innovation, Komfort und Design. Als eines der ersten Unternehmen unserer Branche verfügen wir über ein Qualitätssicherungssystem, zertifiziert durch Büro Veritas, das den folgenden Richtlinien und Normen entspricht: ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004.

Außerdem werden unsere Produkte von unabhängigen Prüfstellen auf der ganzen Welt geprüft. Deshalb erfüllen unsere Produkte die höchsten Anforderungen in den Bereichen Qualität und Sicherheit. Wir liefern unsere Treppenlifte mit einer 2-jährigen Garantie.



EN81-40



**Vierzehner Reihe 1a**  
**04509 Delitzsch**  
**Tel. 034 202 - 97 97 50**  
**Fax 034 202 - 97 97 51**  
**info@enwimo.de**  
**www.enwimo.de**



**handicare**

Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Farben leicht von den angezeigten Farben abweichen können. Alle Informationen wurden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt, sie stellen jedoch keine Garantie dar. Handicare behält sich das Recht vor, Designs und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern